


プロフェッショナルな撮影を可能にするツール

contrastors コントラスター

コントラスターを使用し、不必要な部分を覆い隠すことで、情報量の多い写真を撮影することが出来ます。
審美性を求める方に大変お勧めです。

オクルーザル コントラスター

被写体の背面に置くことで不要な部分を覆い隠します。

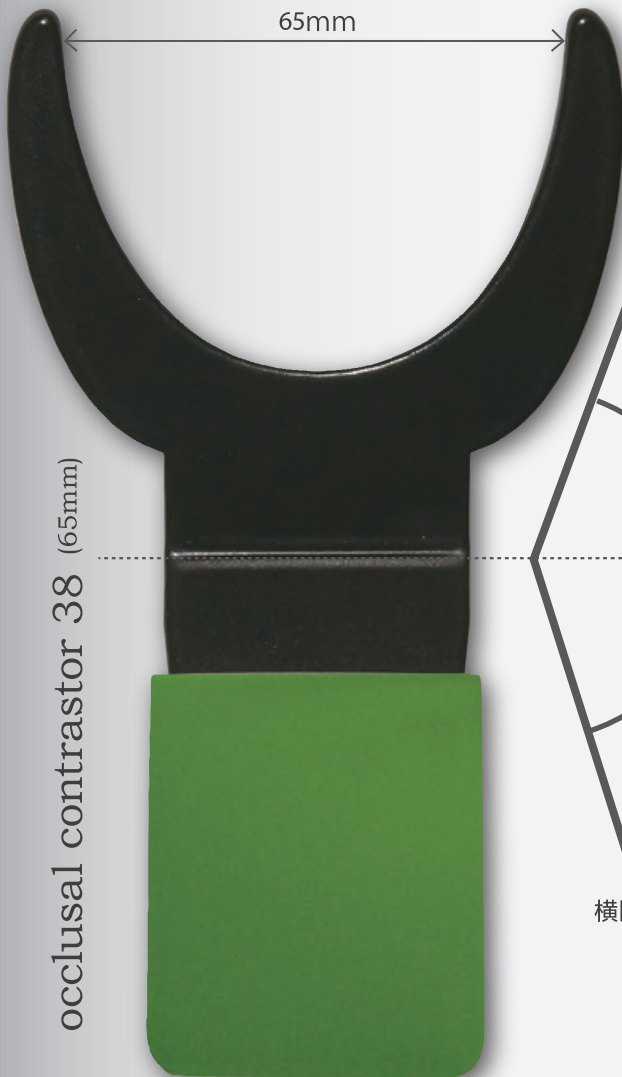

原寸大



アンテリア コントラスター

前歯部の形態や色調の撮影に使用します。



オクルーザルタイプはアーチに沿って口唇や鼻腔などの不要な個所を隠します。

アンテリアタイプは前歯の舌側に入れることでバックを黒くし形態や色調をより正確に写し出します。



contrastors set



オクルーザルコントラスターセット

(NO.35・36・37・38)

4本1セット 定価 21,000円(税別)

NO.	グリップカラー	サイズ
NO.35	黒	50mm
NO.36	赤	55mm
NO.37	青	62mm
NO.38	緑	65mm

※セット販売に付き単品販売は出来ません

※グリップカラーはサイズ区分のため変更できません。

洗浄滅菌後もサイズに合ったグリップをはめてお使いください。



アンテリアコントラスターセット

(NO.30・31・32)

3本1セット 定価16,000円(税別)

NO.	グリップカラー	サイズ
NO.30	緑	52mm
NO.31	オレンジ	56mm
NO.32	赤	66mm



使用例

シェードガイドを利用して
前歯と比較する写真を撮る
ことも出来ます。

※シェードガイドは商品に含まれません。

■使用後の洗浄・滅菌

- ①洗浄 → グリップをはずし流水下で血液・タンパク質を除去(たわし・ブラシは使わない)
洗浄はアルカリ性防錆洗浄液の使用をおすすめします。
- ②すすぎ → 精製水が理想的です(水道水に含まれる塩素含有が金属を腐食させることがあります)。
- ③乾燥 → やわらかい布などで、水分を早急に取り除きます。
- ④滅菌・消毒 → 薬液消毒をおすすめします。
薬液の濃度を守り、換気に注意し1時間以上浸漬させます。
- ⑤乾燥・保管 → やわらかい布などで、水分を早急に取り除き、サビの来ない環境下で保管します。

販売名：コントラスター 分類：一般医療機器
一般的名称：歯鏡 クラス分類：I
一般的名称コード：JMDN 31776000 医療機器届出番号：27B1X00130000010

表示価格はすべて税別です。



製造販売元
デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-1-2F
TEL072-621-0884 FAX072-621-0844
http://dentaltechnica.com info@dentaltechnica.com

お問い合わせ・ご注文は