

MK-dent Spray Oil

MK-dent®
GERMANY

ハンドピースメンテナンスオイルスプレー

100%化学合成高性能オイル



粒子を細かく整えた高級オイルだから
ハンドピースの安定した回転を維持します。

科学合成高性能オイル


従来の鉱物油



より均一分子 = 摩擦の減少



分子の大きさが不均一 = 摩擦の増大

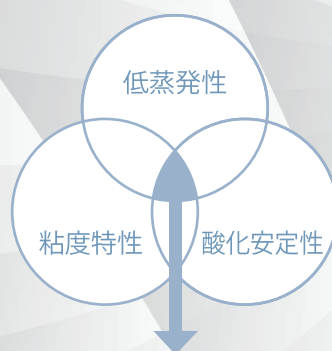

- 潤滑** ...摺動部を滑らかにします。
- 気密** ...金属表面を保護し、酸化を防ぎます。
- 分圧** ...油膜が極めて薄い層になり圧力を分散させます。

標準価格

6本入 27,000 円 (税別)

MK-dentスプレーオイル

このスプレーオイルは全メーカーに対応しております。

使用できるハンドピース

タービンハンドピース
モーターハンドピース
エアスケーラー・エアーモーター

自動注油機用互換オイル

ご使用になれない器具もございます。

アダプター

各1,600円 (税別)



LT1012
Kavo



LT1013
モーター
ハンドピース



LT1014
スピンドル



LT1017
シロナ



LT1018
W&H



LT1020
NSK



LT1022
ヨシダ

※缶のデザインは変更する場合があります。



製造販売元

デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-1-2F

http://www.dentaltechnica.com Mail:info@dentaltechnica.com

TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

ご注文・お問い合わせは

貴方は器械注油派もしくはハンド注油派？

修理のプロが教える注油方法豆知識！！

ハンドメンテナンスについて

ハンドピースに切削粉や摩擦による粉塵が残るとハンドピースの寿命は著しく低下します。回転の仕組みを理解し簡単な『メンテナンスのコツを覚える』と驚くほど簡単にメンテナンスコストを削減することができます。また、下記のように、内部の汚れの状態を把握すれば的確な注油と注油量の調節が可能になります。



チャック内洗浄

チャック内洗浄はどのハンドピースにも効果があります。



汚れが残るとその汚れが研磨剤となりチャックとバーが痛みます。



メンテナンスオイル

先が細いので、チャック内に挿入しやすく、また1滴2滴と注油ができ、無駄がありません。



定価 1本
2,800 円

一体型ハンドピースメンテナンス

適合したノズルを必ず使用しバックキャップからオイルがあふれ出るまで注油してください



汚れたヘッド内部パーツ





※ パージ：ユニットに付け 20 秒以上回転させて下さい。
オイルを飛ばすと同時にハンドピース内にオイルを循環させます。

セパレート型コントラ

MK-dent の等速・減速コントラハンドピースはヘッドが取り外せる

ギアノズルハンドピースは注油するとき、オイル抜けが悪く注油の噴射圧力でハンドピースが固定しにくく、オイルが漏れ、十分な注油が出来ないことがあります。Mk-dent の等速や減速コントラはヘッドを外してそれぞれに注油することが出来るので無駄なオイルを使うことなく、十分な注油が出来ます。

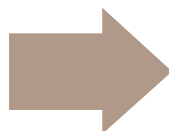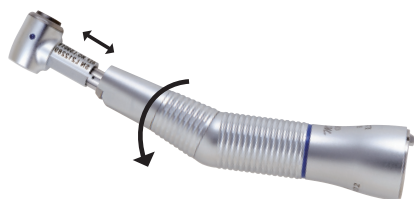

注油を確実にするためにパージをおこなってください。 ※ パージ：ユニットに付け 20 秒以上回転させて下さい。
オイルを飛ばすと同時にハンドピース内にオイルを循環させます。

注油後はスタンドに立てて保存してください