

スマートクリーナー

原理は簡単 水鉄砲!!
汚れを水圧で押し流します。

水づまりで高いメンテナンス料を払ってはいませんか?
ジョイント(カップラー)を本機にセットするだけ!
強力なピストンが水と一緒に汚れを押し出します。
簡単で驚異的な洗浄力です。

早期発見!

早期解消!



全く出ない



4点注水の1点だけ
出ない



コントラのストリート
にも対応

デンタルテクニカ製オリジナル国内メーカー対応ジョイント

※オサダは除く。



スマートコネクト
モーター用

9,800 円
(税別)



スマートジョイント
Yoshida用
(Oタイプ)

9,800 円
(税別)



スマートジョイント
Yoshida用
(Nタイプ)

9,800 円
(税別)



スマートジョイント
モリタ用

9,800 円
(税別)



複数の注水口のうち
一部づまった時に
使います
スマートカップパー

9,800 円
(税別)



4Hタイプのホースを
クリーニング
スマートチューブ


9,800 円
(税別)

詳細は裏面を御覧ください。

ミッドウエスト


4H (ISO標準) 対応タイプ 24,500 円 (税別)

KAVOジョイント・NSKジョイント
W&Hジョイント・Sironaジョイント
etc.

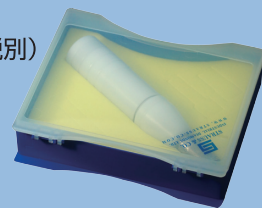

オススメ 3 点セット販売のご案内

お得です

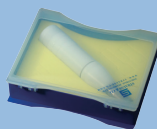

本体



スマートコネクト



スマートカップパー

~~定価 44,100 円~~
39,690 円
(税別)

スマートクリーナー本体 / モーター用コネクト / スマートカップパーの組み合わせ限定で
他のオプションとの組み合わせ変更は出来ません。



販売元

デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-1-2F

TEL 072-621-0884

FAX 072-621-0844

http://www.dentaltechnica.com Mail: info@dentaltechnica.com


お問合せ先

スマートクリーナーの使い方


ハンドピース装着例



①

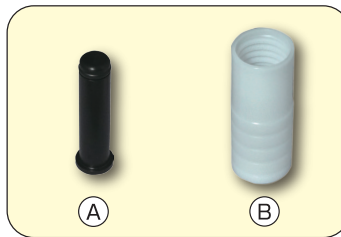


②

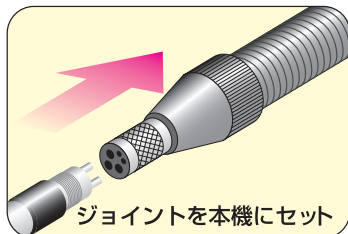

ジョイントを本機にセット

ハンドピースをカップラーごとはずし
ジョイントにセットします。

③

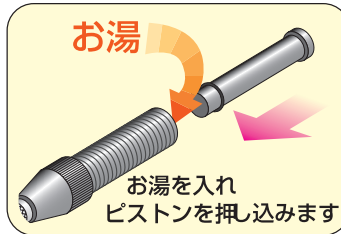


お湯

お湯を入れ
ピストンを押し込みます

水または、湯を流しこみます。
(熱めのお湯が効果的です)


④

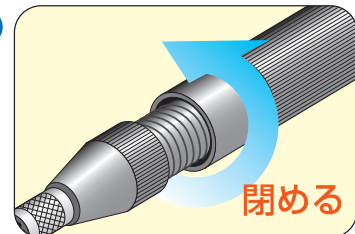

閉める

①のピストンをセットし、押します。
(出にくい場合は②のカバーをセットし、
ねじの力で押ししてください)

⑤

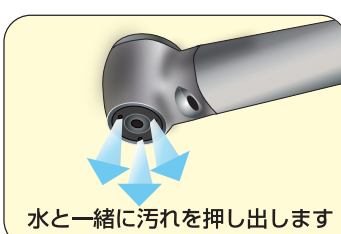

水と一緒に汚れを押し出します

数回繰り返す、ピストンがスムーズに
動くようになるまで繰り返します。


※三点注水口の水づまりは、出る穴を
(スマートカップパーやゴム手袋等)
で押さえてください。

注意

注水口の変形など、汚れ以外の要因により、水づまりがおきている時は、スマートクリーナーでは解決しません。

スマートカップパーの使い方

スマートカップパーはハンドピースの1つの穴だけ詰まっている場合の洗浄に使用するスマートクリーナー専用のオプションです。

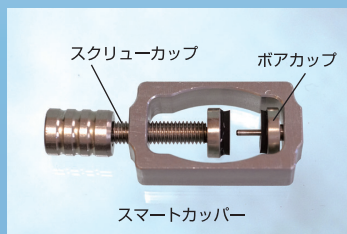

①スクリーカップをまわし
ボアカップを取りはずす



②タービンの水が出ない穴を
確認する (マジックで印を付ける
とわかりやすい)



③ボアカップをタービンに
挿入します



④②で印をつけた穴がボアカップ
から見えるように合わせる



⑤スマートカップパー本体に
固定する



⑥静かにネジを締め、スマート
クリーナーを接続し、洗浄して下さい