

スマートクリーナー

原理は簡単 水鉄砲!!
汚れを水圧で押し流します。

水つまりで高いメンテナンス料を払ってはいませんか?
 ジョイント(カップラー)を本機にセットするだけ!
 強力なピストンが水と一緒に汚れを押し出します。
 簡単で驚異的な洗浄力です。



早期発見! **早期解消!**



全く出ない 4点注水の1点だけ出ない コントラのストレートにも対応

デンタルテクニカ製オリジナル国内メーカー対応ジョイント
※オサダは除く。



スマートコネクト モーター用 スマートジョイント Yoshida用 (Oタイプ) スマートジョイント Yoshida用 (Nタイプ) スマートジョイント モリタ用
 各 12,397円 (税込)




複数の注水口のうち一部つまった時に使えます
 スマートカップパー 12,397円 (税込)



4Hタイプのホースをクリーニング
 スマートチューブ 12,397円 (税込)


詳細は裏面を御覧ください。

ミッドウエスト 標準価格 31,020円 (税込)
 4H (ISO標準) 対応タイプ
 KAVOジョイント・NSKジョイント
 W&Hジョイント・Sironaジョイント
 etc.

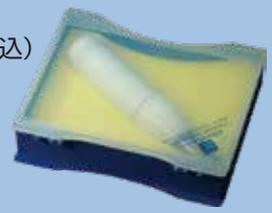

オススメ 3点セット販売のご案内

お得です

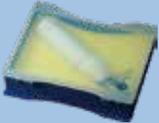
 +
 
 +
 
 =
 ~~標準価格 55,814円~~
50,160円 (税込)

本体 スマートコネクト スマートカップパー

スマートクリーナー本体 / モーター用コネクト / スマートカップパーの組み合わせ限定で他のオプションとの組み合わせ変更は出来ません。


お問い合わせ先

スマートクリーナーの使い方


ハンドピース装着例



1

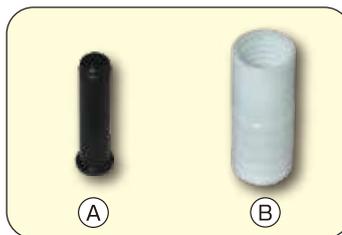


2

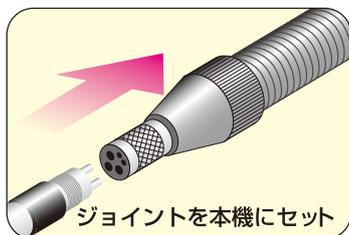

ジョイントを本機にセット

ハンドピースをカップラーごとはずし
ジョイントにセットします。

3

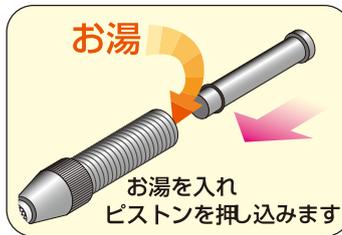


お湯

お湯を入れ
ピストンを押し込みます

水または、湯を流しこみます。
(熱めのお湯が効果的です)

4

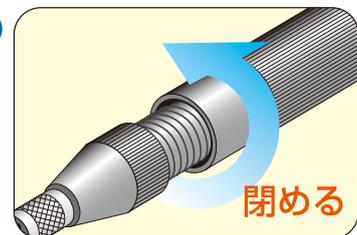

閉める

①のピストンをセットし、押します。
(出にくい場合は②のカバーをセットし、
ねじの力で押ししてください)

5



水と一緒に汚れを押し出します

数回繰り返す、ピストンがスムーズに
動くようになるまで繰り返します。


※三点注水口の水づまりは、出る穴を
(スマートカップラーやゴム手袋等)
で押さえてください。

注意

注水リングの変形など、汚れ以外の要因により、水づまりがおきている時は、スマートクリーナーでは解決しません。

スマートカップラーの使い方

スマートカップラーはハンドピースの1つの穴だけ詰まっている場合の洗浄に使用するスマートクリーナー専用のオプションです。

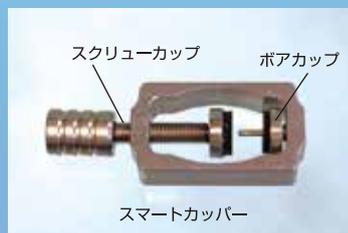

スマートカップラー

①スクリューカップをまわし
ボアカップを取りはずす



②タービンの水が出ない穴を
確認する (マジックで印を付ける
とわかりやすい)



③ボアカップをタービンに
挿入します



④②で印をつけた穴がボアカップ
から見えるように合わせる



⑤スマートカップラー本体に
固定する



⑥静かにネジを締め、スマート
クリーナーを接続し、洗浄して下さい